

VIII. Dane techniczne

Nazwa	Leżanka Nova / Nova Heat	Leżanka Nova Komfort
Długość segmentów blatów	66/126 cm	72 / 50/ 69 cm
Szerokość	69 cm	69 cm
Wysokość	58 - 83 cm	58 - 83 cm
Długość	194 cm	194 cm
Regulacja kąta podnoszenia poduszki	0° - 55°	0° - 55°
Regulacja kąta łamania blatu	-	0° - 25°
Waga bez wyposażenia	29 kg	29 kg
Grubość pianki	6 cm	6 cm
Wytrzymałość dynamiczna*	350 kg	350 kg
Wytrzymałość statyczna**	1400 kg	1400 kg

* Wytrzymałość dynamiczna – pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

**Wytrzymałość statyczna – pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

leżanek drewnianych



Nova
Nova Heat
Nova Komfort




HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasto, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl
www.habys.pl

I. Zastosowanie

Leżanki drewniane umożliwiają fizjoterapeucie prawidłowe, bezpieczne i efektywne prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii, fizykoterapii, masażu, mających na celu leczenie lub łagodzenie przebiegu chorób oraz skutków urazów/upośledzeń. Stosowane w gabinetach medycznych i lekarskich umożliwiają pacjentom przybranie prawidłowej postawy do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu lub badania. Budowa leżanek pozwala fizjoterapeucie na łatwy i pełny dostęp do pacjenta z każdej strony, dzięki czemu wszelkiego rodzaju zabiegi przynoszą zamierzony skutek i zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia zabiegu/badania.


II. Budowa

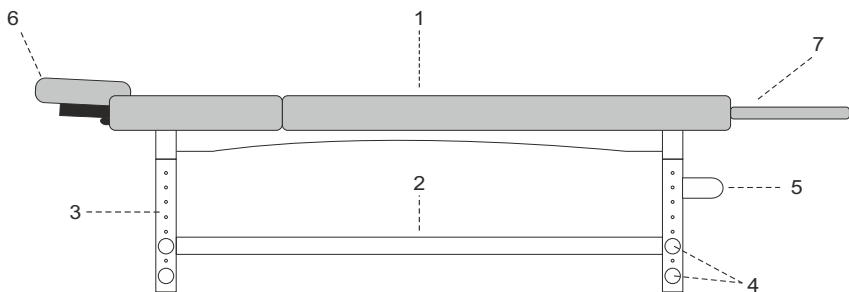

1. Błat górny
2. Półka
3. Noga ruchoma
4. Nakrętka
5. Wieszak na ręcznik (wyposażenie dodatkowe)
6. Podglówek (wyposażenie dodatkowe)
7. Półka tylna (wyposażenie dodatkowe)



A. Leżanka Nova / Nova Heat

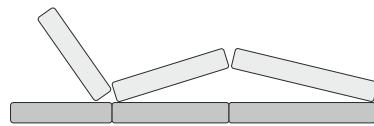

B. Leżanka Nova Komfort

III. Obsługa

1. Ustawić leżankę na twardym i równym podłożu.
2. Ustawić odpowiednią wysokość leżanki według schematu „IV. Regulacja wysokości”.
3. Zamontować podglówek (6) i pozostałe wyposażenie (5, 7) (jeżeli występuje).
4. Unoszenie części ruchomej leżanek Nova / Nova Heat i Nova Komfort odbywa się poprzez:
 - a) odłączenie rzepu zabezpieczającego,
 - b) uniesienie na żądaną wysokość.
5. Opuszczenie części ruchomej leżanek Nova / Nova Heat i Nova Komfort odbywa się poprzez jej maksymalne uniesienie, następnie opuszczenie na dół i zabezpieczenie za pomocą rzepu.

IV. Regulacja wysokości

1	2	3	Opis czynności
			<ol style="list-style-type: none">1. Odkręcić nakrętki.2. Zdjąć nogę ruchomą ze śruby mocującej, przełożyć ją w wybrane położenie.3. Zakręcić nakrętki.

V. Ułożenie pacjenta

Pacjent siada z boku leżanki na blat i przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje masażysta, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole, a po skończonym zabiegu pomaga bezpiecznie zejść ze stołu.

VI. Czyszczenie i dezynfekcja

Powierzchnie drewniane lub ze sklejki należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki wycierając je do sucha. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych. Uwaga! Drewno jako naturalny surowiec może posiadać różnice w układzie sioi, różnice w odcieniach koloru jak i naturalne wstawki typu: smugi, kropki. Nie obniża to jakości wyrobu, a wręcz podkreśla jego naturalne pochodzenie. Cechy takie nie są podstawą do reklamacji.

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

VII. Uwagi eksploatacyjne

1. Leżanka przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych oraz do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Nie dopuszcza się przenoszenia leżanki wraz z pacjentem.
3. Zabrania się gwałtownego siadania na leżankę (wskakiwania).
5. Zabrania się siadania, klękania i opierania na podglówku.
7. Leżanka powinna być użytkowana i przechowywana z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła.
8. Właściwe użytkowanie leżanki zapewni długą i bezawaryjną eksploatację.
9. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą do reklamacji.
10. Użytkownik leżankę zgodnie z instrukcją obsługi.
11. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.