

INSTRUKCJA OBSŁUGI

parawanów metalowych Standard



CE

HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl
www.habys.pl

HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl
www.habys.pl

I. Zastosowanie

Wyrób stosowany w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych i operacyjnych do zapewnienia podstawowej izolacji pacjenta dla zapobiegania chorobom roznoszonym drogą kropelkową lub powietrzną oraz zapewnienia pacjentowi leżącemu podstawowych warunków dyskrekcji w trakcie zabiegów i codziennych czynności życiowych.

Parawany standard stanowią wyposażenie stacjonarnych stołów rehabilitacyjnych, łóżek szpitalnych, kozetek lekarskich, w gabinetach lekarskich, szpitalach.

II. Budowa

| Elementy | Ilości |
|-----------------------------|--------|
| Stelaż metalowy | 1 szt. |
| Podstawa metalowa z kółkami | 1 szt. |
| Ekran parawanu | 1 szt. |
| Taśma rzep | 2 szt. |
| Łączniki modułów | 2 szt. |

III. Obsługa

Kolejność rozkładania parawanu:

1. Rozłożyć stelaż.
2. Włożyć podstawy metalowe z kółkami w rurki stelaża, trafiając w otworek znajdujący się w stelażu.
3. Założyć ekran parawanu do stelaża metalowego i zamocować za pomocą taśmy rzep.
4. W celu rozbudowania parawanu o kolejne moduły użyj łączników do ich połączenia.






IV. Konserwacja

Konserwacja polega na pocieraniu wilgotną szmatką stelaża parawanu na mokro, można stosować detergenty rozpuszczone w ciepłej wodzie.

Do czyszczenia parawanu nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton, gdyż mogą trwale uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierowaną!

Stelaż może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

W celu czyszczenia ekranu parawanu stosować poniższą instrukcję:

-  - Temperatura prania od 60 do 90 stopni
-  - Nie wolno wybielać
-  - Prasować w średniej temperaturze
-  - Wskazówka dla pralni dotycząca środka zalecanego przy praniu chemicznym
-  - Można suszyć w suszarce

Tkanina ekranu wykonana z:

- poliester (67%),
- bawełna (33%).

V. Zalecenia

1. Użytkować parawan zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

VI. Dane techniczne

| | |
|-----------|--------|
| Długość | 164 cm |
| Szerokość | 95 cm |
| Głębokość | 35 cm |
| Waga | 5 kg |