



6. Ustaw szyld tapicerski poziomo względem krawędzi stołu.

Set the upholstery plate horizontally relative to an edge of the table.

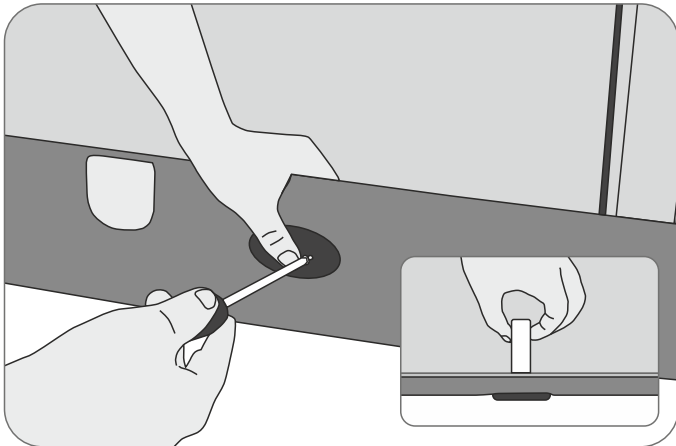

7. Przykręć szyld i przyklej elastyczną podkładkę stabilizującą wyposażenie (tzw. elastomer)*

Screw the plate and glue elastic, stabilizing pad for equipment (elastomer)**

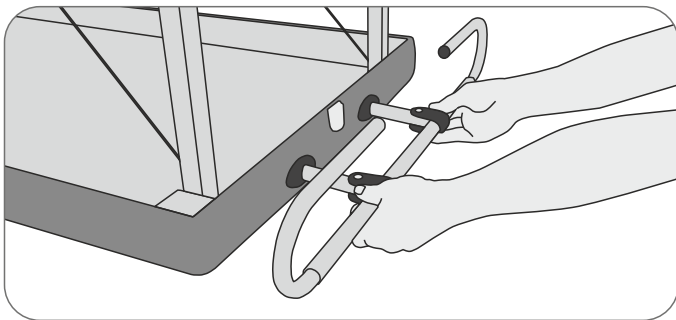

8. Zamontuj drugi szyld i wsuń wieszak

Assembly second plate and slide the roll holder

*Przed przyklejeniem elastomeru, blat stołu musi być oczyszczony i odpylony. Można przetrzeć szmatką nasączoną np. benzyną ekstrakcyjną, a po przyklejeniu należy dobrze docisnąć na całej powierzchni.

** Before you glue the elastomer, the tabletop must be dusted and cleaned. For this purpose, you can use a cloth soaked in extraction naphtha. After glueing it is recommended to press the elastomer on the entire surface.

INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA


manual of roll holder self-assembly

 **HABYS**[®]
for perfect massage




HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasto, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

www.habys.pl

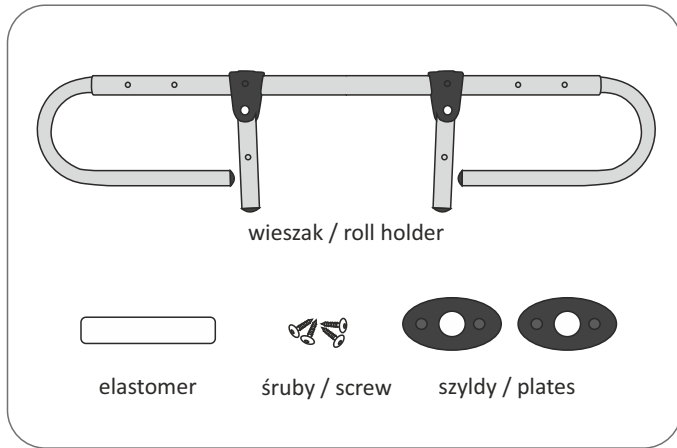


Wyposażenie Equipment

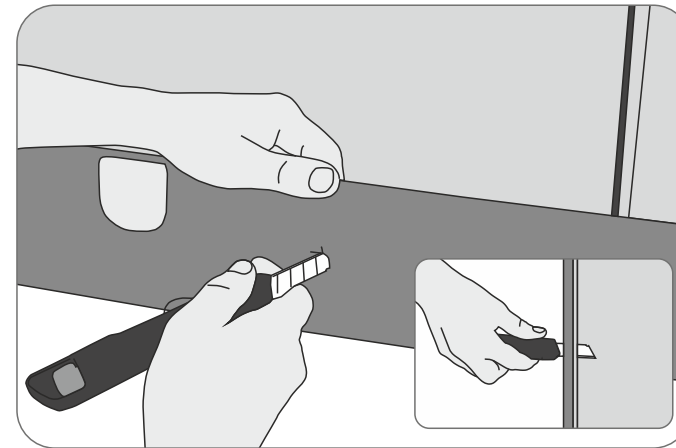


3a. Rozetnij tapicerkę od środka otworu do krawędzi sklejk.

Cut the upholstery from the center of the hole to the edge of the plywood.

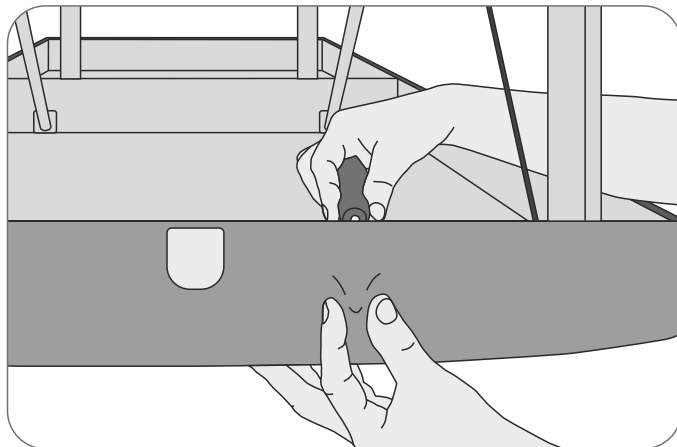



1. Wyznacz środek otworu na szyld tapicerski.

Mark the center of the plate upholstery hole.

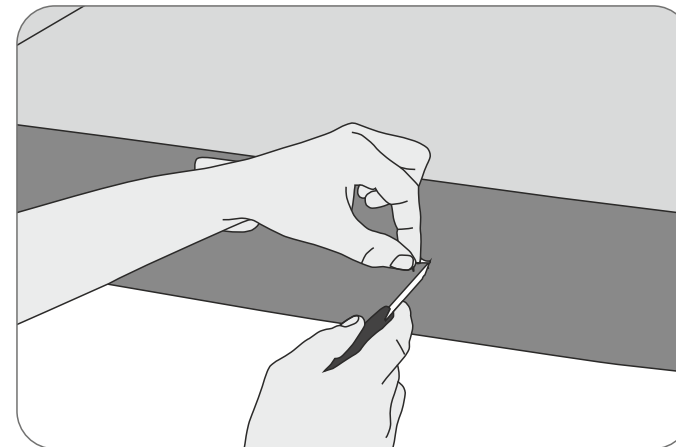


4. Odetnij tapicerkę ze światła otworu.

Remove the upholstery from the hole.

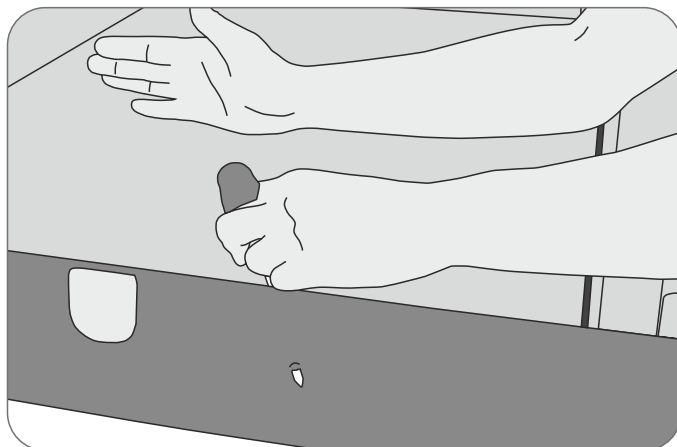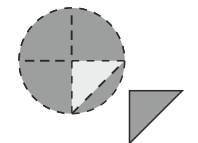

2. Energicznym uderzeniem ręki przebij tapicerkę na wylot.

Pierce through the upholstery with energetic hand blow using the screw driver.

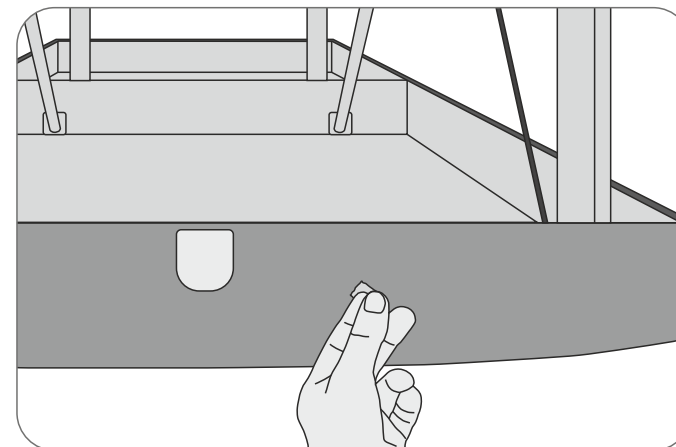

5. Usuń pozostałą w otworze piankę.

Remove the remaining foam from the hole.